

# ヤイック®

## 幅広で安心の固定力


- 強力弾性素材でしっかり固定
- 通気性、吸湿性を重視した素材
- 2本のステーがしっかりサポート



- 補助ベルトが固定力 UP
- 金属ステーで腰椎への支持力 UP




■ サイズ別に立体裁断、確実な装着

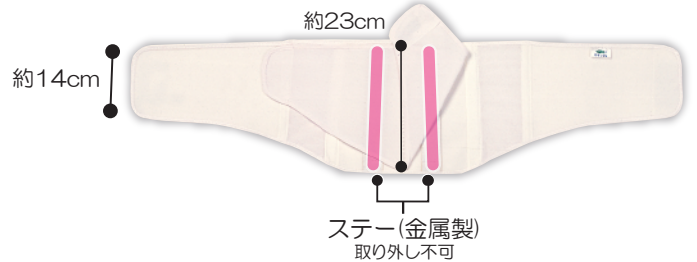

## 素材

綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・アルミニウム(ステー)

## 装着方法

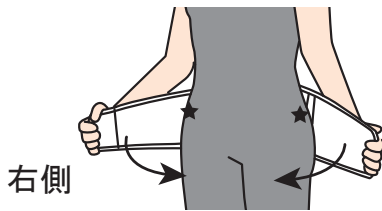

① 本体の両端を持ち、腸骨(★)を覆うように体の正面で留めます。



② 補助ベルトを引っ張り、下腹部を引き上げるように補助ベルトを留めます。



③ 装着完了。ゆるみやズレがないか確かめてください。

## 規格

オープン価格


商品番号	規格(腰廻り)	販売単位	JAN CODE	ケース単位
034242	S 65cm ~ 75cm	1枚	4958995342420	5枚
034243	M 75cm ~ 90cm	1枚	4958995342437	5枚
034244	L 90cm ~ 105cm	1枚	4958995342444	5枚
034245	LL 105cm ~ 120cm	1枚	4958995342451	5枚



1枚入

### サイズの選び方

#### 計測部位目安

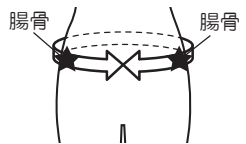

★ 腸骨(ちょうこつ)  
骨盤の出っ張った骨の部分

# 腰部固定帯ラインナップ

腰廻り (共通)

S 65cm ~ 75cm

M 75cm ~ 90cm

L 90cm ~ 105cm

LL 105cm ~ 120cm

※ライーフットのみ  
XL 120cm ~ 135cm  
3L 135cm ~ 150cm



**2 段  
ベルト**

**ライーブ® フィット**

3次元形状の**特殊樹脂ステー 2本**



約23cm



(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材

- 特長 上下のベルトで  
適確にフィット
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



**スタン  
ダード**

**ライーブ®**

フィット性に優れた**金属ステー 2本**



約12cm



(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材

約20cm

- 特長 吸湿性が優れている
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



**幅 広**

**ヤイック®**

フィット性に優れた**金属ステー 2本**



約14cm



通気性、吸湿性を  
重視した3層特殊  
構造の素材

約23cm

- 特長 強力弾性素材で  
確実な腹圧上昇
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤野メディア・ビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店